

Two Extra Screw

ネイルシステム

ロングネイル

230mm



HOMS 

株式会社 ホムズ技研

ロングネイル手技 概要

※基本的な一連の手技は Two Extra Screw ネイルシステムカタログをご参照ください。

≡ 整復




リダクションロッド (ST) Sを用いて骨折部を整復します。

≡ デバイス準備



ロングネイルに専用のターゲットデバイスを接続します。
左右に合わせ、専用のディスタルガイド (左用又は右用) をつまみにて接続固定します。
ディスタルスクリュー用スリーブを挿入し、ディスタルスクリュードリルを通しネイルに干渉しないことを確認します。

≡ 遠位ドリリング

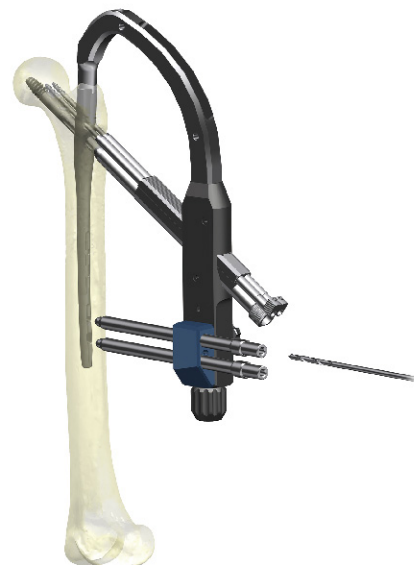

遠位スクリューホールのドリリングを行います。

ロングネイル Implant Line up

※ラグスクリュー、エクストラピン/スクリュー、ディスタルスクリュー及びエンドキャップのラインアップは Two Extra Screw ネイルシステムカタログをご参照ください。

ロングネイル 230mm

■近位径 $\phi 16.5$ ■前捻角 10°
■遠位径 $\phi 10$ $\phi 11$ $\phi 12$

適応例

大腿骨転子下骨折、リビジョン不安定型骨折



製品名	カタログNo.	前捻	頸体角	遠位径(mm)	JANコード
TESネイル125° ロング 左	P503-1023L	左	125°	10	4560434072289
	P503-1123L			11	4560434073309
	P503-1223L			12	4560434073316
TESネイル130° ロング 左	P504-1023L	左	130°	10	4560434072395
	P504-1123L			11	4560434073330
	P504-1223L			12	4560434073347
TESネイル125° ロング 右	P505-1023R	右	125°	10	4560434072500
	P505-1123R			11	4560434073361
	P505-1223R			12	4560434073378
TESネイル130° ロング 右	P506-1023R	右	130°	10	4560434072616
	P506-1123R			11	4560434073392
	P506-1223R			12	4560434073408

〈インプラント〉

販売名	TESネイルシステム
医療機器承認番号	22700BZX00086000
医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

〈器械〉

販売名	IPTネイルシステム用手術器械 TESネイルシステム用手術器械
医療機器届出番号	20B1X00006H00001 20B1X00006H00035
医療機器分類	一般医療機器
成分	ステンレス, PF, アルミ合金, チタン合金, PEEK
使用上の注意	添付文書参照のこと

販売元



株式会社 ホムズ技研 営業部

東京支店	Tel: 03-5989-0090	Fax: 03-5989-0091
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006