



HOMS ENGINEERING INC.

CSP WIRING SYSTEM



株式会社 ホムズ技研

CSP WIRING SYSTEM [CSピンセット]

CSピンセットは、CSピンとケーブルから構成され、専用の手術器械セットを用いて安定したテンションバンドワイヤリング固定を可能とさせています。

ステンレス製とチタン製をラインアップし、様々な部位に対応できるようにしています。

CSピンの挿入はスムーズに確実に行えます

Step.1

CSピンを挿入します

CSピンアダプタを使用することで
パワーツールとの脱着が
ワンチャックで容易に
行えます。




Step.2

ホルダーを 引き上げます



Step.3

スナップさせ ホルダーを取り外します

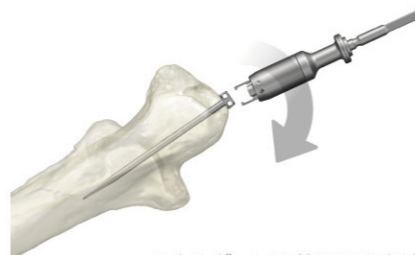

※ホルダーは再使用できません

※ 構成品一覧 [CSピンセット ステンレス]

適応例：肘頭 膝蓋骨骨折



適応例：肘頭 膝蓋骨骨折




ステンレス


締結部は2穴タイプ他、ステンレス製のみ1穴タイプを用意し、ケーブル挿通作業を容易にしました。

(1穴タイプでも専用器具によるケーブルのクリンプが可能です)

適応例 膝蓋骨骨折

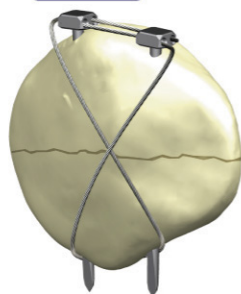

適応例 肘頭骨折

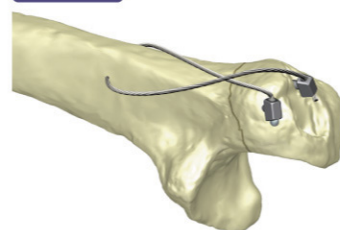

※ 構成品一覧 [CSピンセット チタン]

適応例：内果骨折




適応例：大転子部固定



チタン

適応例 内果骨折

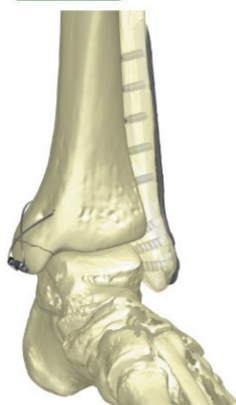

適応例 大転子部固定



CSP

WIRING SYSTEM

[ケーブルセット]




ケーブルセットは、ケーブル、スリーブ締結器及びケーブルアダプタから構成され、HAIインプラントシリーズとの併用が可能です。

これまでスクリューの適用が難しかった症例でも、ケーブル固定の併用により、整復位の安定化を図っています。

≫ 構成品一覧 [チタン $\phi 1.2$] ケーブルセット

適応例 鎖骨遠位端骨折

HAI
Clavicle Locking Plate System
鎖骨遠位端ロックングプレート

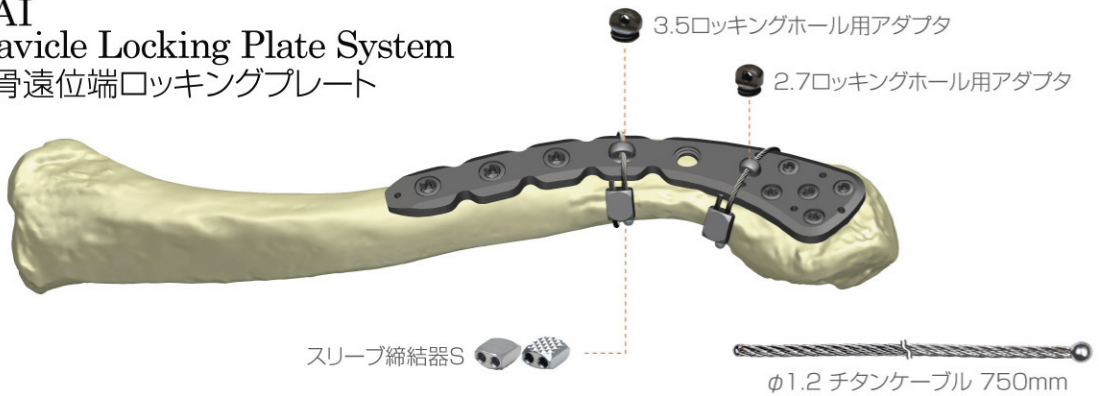


チタン $\phi 1.2$

≫ 構成品一覧 [チタン $\phi 1.8$] ケーブルセット

適応例 大腿骨転子部骨折・大腿骨転子下骨折

IPT Nail System

HAI Compression
Hip Screw System

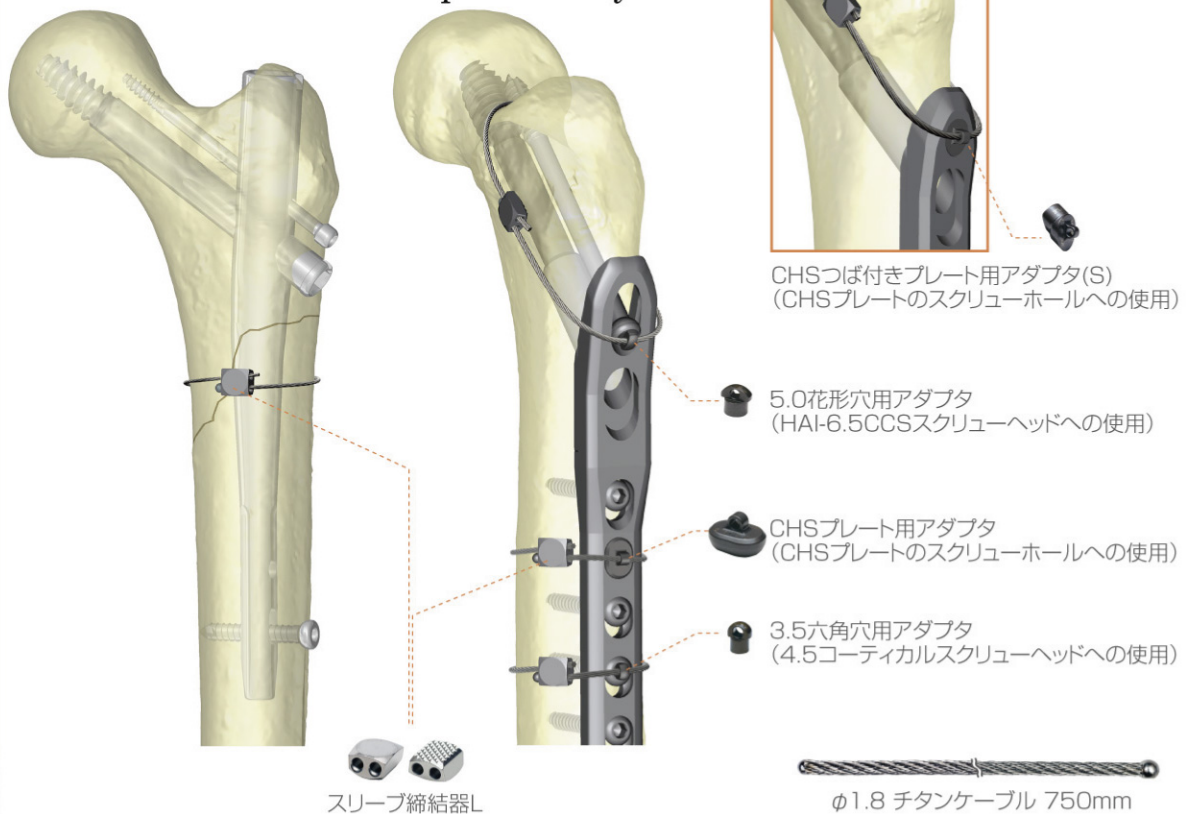

チタン $\phi 1.8$

HOMS

[CSピンセット ステンレス]

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
2.0CSピン(R)SUS ・2穴	H711-2240	40	4580118209503
	H711-2242	42	4580118209510
	H711-2244	44	4580118209527
	H711-2246	46	4580118209541
	H711-2248	48	4580118209558
	H711-2250	50	4580118209565
	H711-2255	55	4580118209572 *
	H711-2260	60	4580118209589 *
	H711-2265	65	4580118209596 *
	H711-2270	70	4580118209602 *
	H711-2200	100	4580118209664 *

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
φ1.2ケーブルSUS ・鋭先	H716-1275	750	4580118209749

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
2.0CSピン(R)SUS ・1穴	H711-2140	40	4580118209671 *
	H711-2142	42	4580118209688 *
	H711-2144	44	4580118209695 *
	H711-2146	46	4580118209718 *
	H711-2148	48	4580118209725 *
	H711-2150	50	4580118209732 *
	H711-2175	75	4560434070230 *
	H711-2100	100	4560434070285 *

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
φ1.2ケーブルSUS ・鋭先・ベース	H717-1250	500	4580118209787 *

※オプション

HOMS

[CSピンセット チタン]

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
2.0CSピン(R)Ti ・2穴	H712-2240	40	4580118209855
	H712-2245	45	4580118209862
	H712-2250	50	4580118209879
	H712-2255	55	4580118209886
	H712-2260	60	4580118209893
	H712-2265	65	4580118209909
	H712-2270	70	4580118209916

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
φ1.2ケーブルTi ・鋭先	H714-1275	750	4580118209992

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
3.0CSピン(R)Ti ・2穴	H712-3240	40	4580118209923
	H712-3245	45	4580118209930
	H712-3250	50	4580118209947
	H712-3255	55	4580118209954
	H712-3260	60	4580118209961
	H712-3265	65	4580118209978
	H712-3270	70	4580118209985

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
φ1.8ケーブルTi ・鋭先	H714-1875	750	4560434070001

HOMS

[ケーブルセット φ1.2]

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
φ1.2ケーブルTi ・ベース(締結器入り)	H715-1275A	750	4560434070032

製品名	カタログNo.	適応ケーブル	JANコード
スリーブ締結器S・Ti	H713-0012	φ1.2 Ti	4560434070056

製品名	カタログNo.	適応ケーブル	JANコード
3.5ロッキングホール用 アダプタ	H721-3512	φ1.2 Ti	4560434070070 *
2.7ロッキングホール用 アダプタ	H721-2712	φ1.2 Ti	4560434070087 *

※オプション

〈インプラント〉

成分	ステンレス鋼 SUS316L	チタン合金Ti-6Al-4V, 純チタン
販売名	CSPワイヤリングシステム(SUS)	CSPワイヤリングシステム(Ti)
医療機器承認番号	22500BZX00064000	22500BZX00063000
医療機器分類	高度管理医療機器	
使用上の注意	添付文書参照のこと	
滅菌済み 再使用禁止		

HOMS

[ケーブルセット φ1.8]

製品名	カタログNo.	長さ(mm)	JANコード
φ1.8ケーブルTi ・ベース(締結器入り)	H715-1875A	750	4560434070049

製品名	カタログNo.	適応ケーブル	JANコード
スリーブ締結器L・Ti	H713-0018	φ1.8 Ti	4560434070063

製品名	カタログNo.	適応ケーブル	JANコード
CHSプレート用 アダプタ	H722-0018	φ1.8 Ti	4560434070094 *
CHSつば付きプレート用 アダプタ(S)	H722-0118	φ1.8 Ti	4560434070100 *
3.5六角穴用 アダプタ	H723-3518	φ1.8 Ti	4560434070117 *
5.0花形穴用 アダプタ	H723-5018	φ1.8 Ti	4560434070124 *

※オプション

販売元



株式会社 ホムズ技研 営業部

HOMS

東京支店	Tel: 03-5989-0090	Fax: 03-5989-0091
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
横浜営業所	Tel: 045-595-9292	Fax: 045-595-9293
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006