


IPIT MAIL SYSTEM

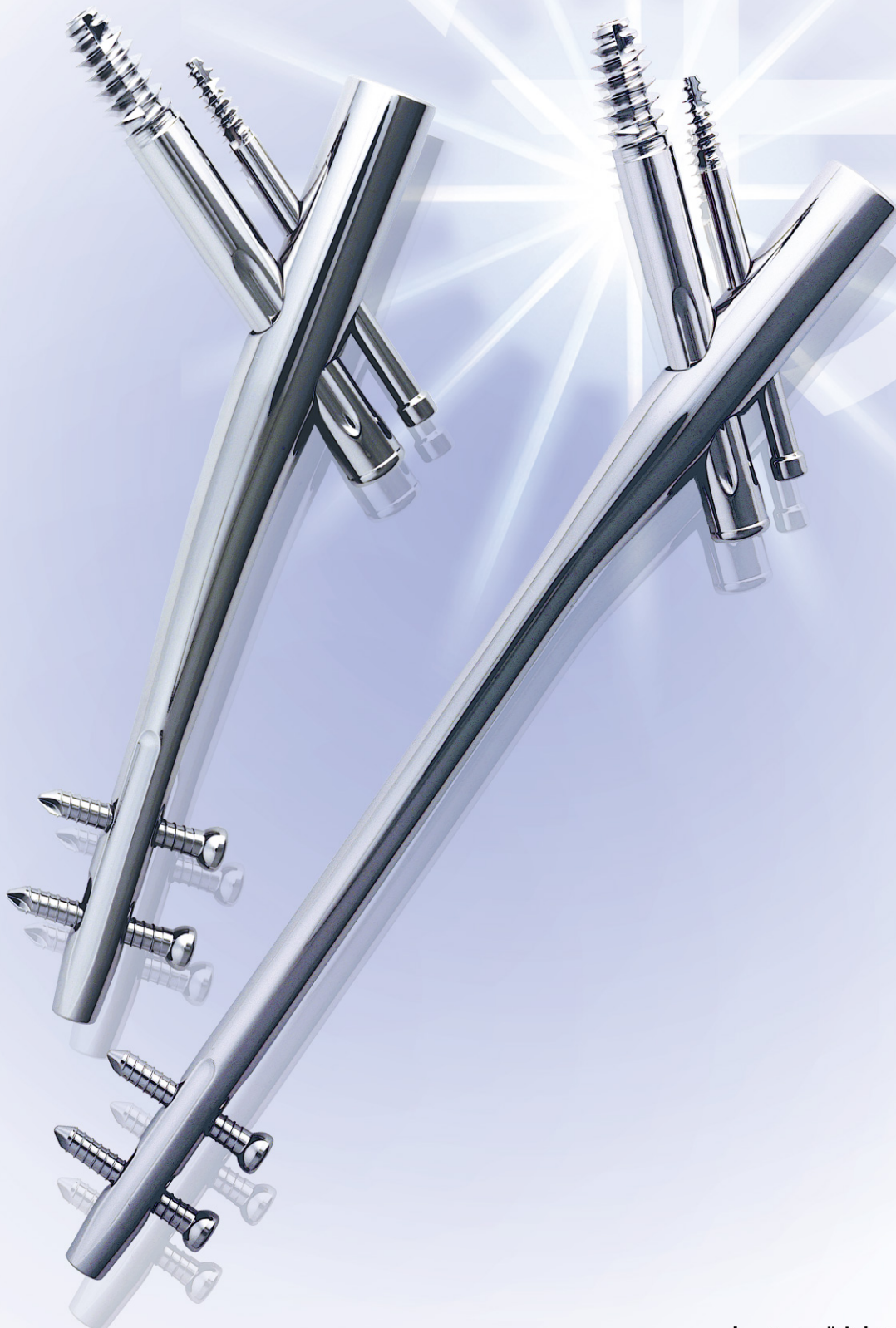

IPTネイルシステムは、ラグスクリューの回旋防止と、エクストラスクリューによる頸基部の回旋防止を同時に行うことを可能とした、大腿骨近位部骨折用の髓内固定システムです。ラグスクリューのロッキング手技も容易で、手術時間を短縮し確実な固定が行えます。豊富なサイズバリエーションにより、あらゆる症例にも適用できます。


ネイル

NAIL

〔適応例〕 大腿骨転子部骨折、頸基部骨折

エンドキャップ

症例に応じ、ラグスクリューのスライディングロックとフリーを選択できます。近位端の埋没を防ぐため、延長0mmのほか、延長5mm、10mmまで用意しました。

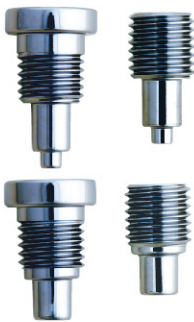

ロック

ラグスクリューの回旋防止を行いながらスライディングをロックします。

フリー

ラグスクリューの回旋防止を行いながらスライディングは許容します。

ラグスクリュー

4つの回旋防止用溝により、90度毎(A/P、M/Lの位置)にロッキングが可能です。スレッドはカットアウトのしにくいデザインです。セルフタップのため容易に挿入できます。

エクストラスクリュー

5mmの中実スクリューで頸基部の回旋防止を行います。ラグスクリューとの間隔も狭く、日本人特有の頸部の狭い症例にも対応します。セルフタップのため、リーミングなしで容易に挿入できます。

ロッキングシステム


ラグスクリューの回旋防止を行いながら、エクストラスクリューによる頸基部の回旋防止を可能としました。頸基部回旋不安定な症例に、遠位側ラグスクリューの回旋防止を行いながら2本のスクリューを挿入できます。

遠位ロッキング

5mmのディスタルスクリューで遠位のロッキングが可能です。全長は2mm刻みで用意されているため内側皮質からのスクリューの突出を最小にします。スタティック固定とダイナミック固定が選択できます。最大5mmまでのダイナミゼーションが可能です。

豊富なラインアップ

遠位径φ9~14まで1mm刻みでラインアップ。髓腔へジャストフィットするネイルを選択できます。

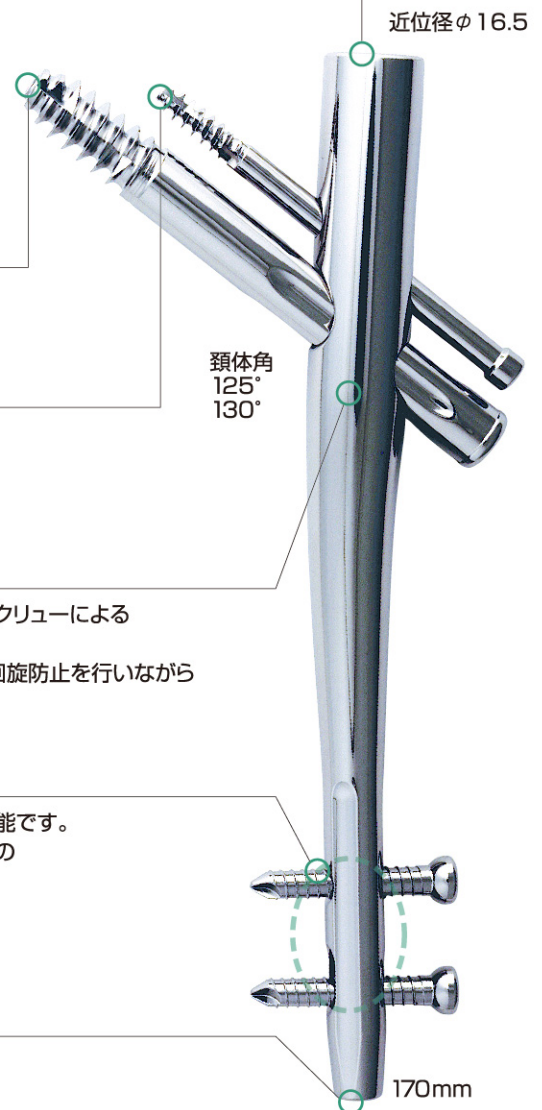

ロングネイル

LONG NAIL

〔適応例〕 大腿骨転子下骨折、骨幹部骨折、リビジョン

近位径φ16.5

前捻角10°

頸体角
125°
130°

サイズバリエーション

300、320、340、360mmのロングネイルのほか、230、240、260、280mmといったミッドレンジを用意し、幅広い症例に対応します。また、230mmネイルには専用のターゲットデバイスを用意しました。ターゲットデバイスの使用により、正確な遠位ロックが可能になり、時間短縮となります。

アノミカルデザイン


日本人向けにデザインされた前弯プロファイルです。遠位径は10mmとなっており、細く長い髓腔にも無理なく挿入できます。

遠位ロック

回旋に対する安定性を考慮し、2本のディスタルスクリューにて固定が行えます。ダイナミゼーションも可能です。

左240mm

左340mm

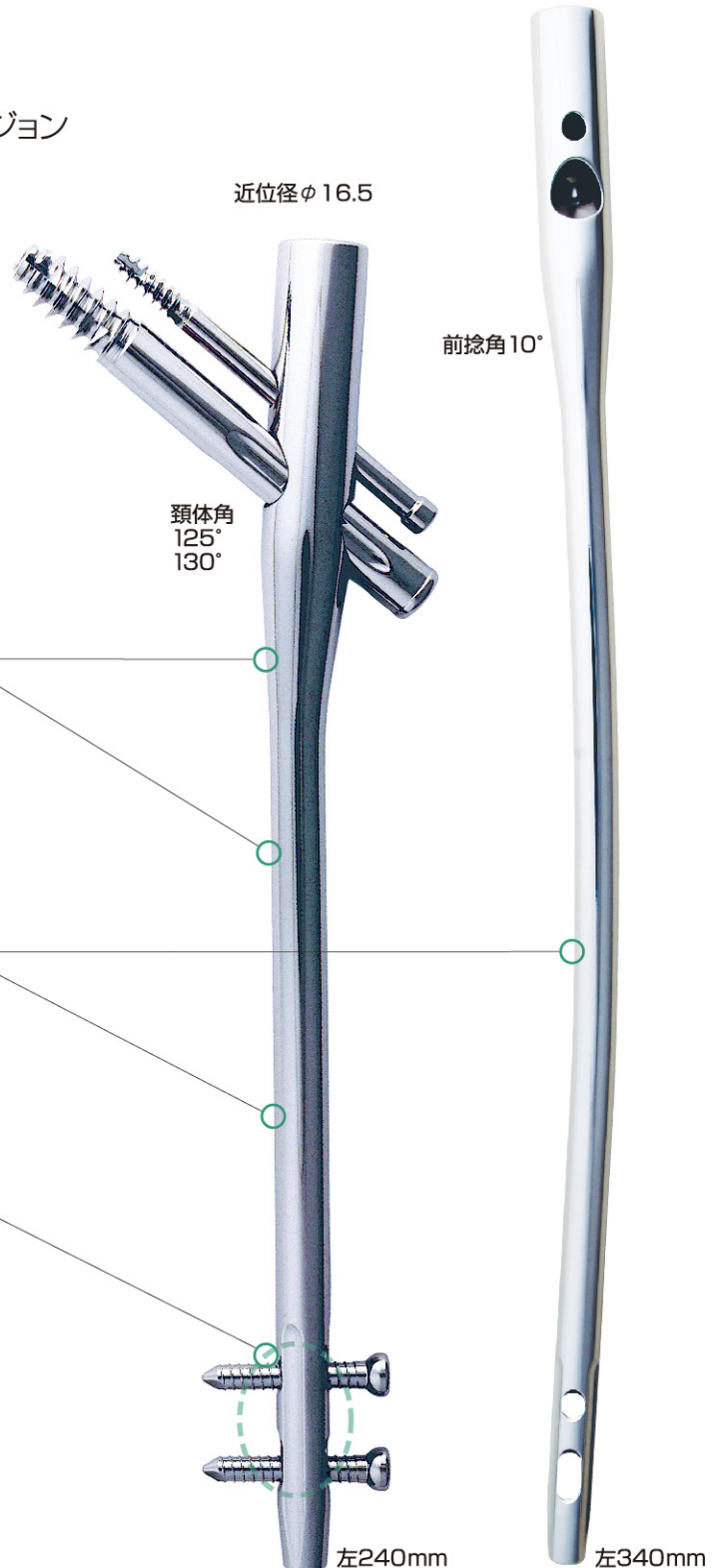

ネイル

全長170mm、近位径φ16.5



製品名	カタログNo.	角度	遠位径(mm)	JANコード
ネイル125°	P001-0917	125°	9	4560264400139
	P001-1017	125°	10	4560264400146
	P001-1117	125°	11	4560264400153
	P001-1217	125°	12	4560264400160
	P001-1317	125°	13	4560264400177
	P001-1417	125°	14	4560264400184
ネイル130°	P002-0917	130°	9	4560264400191
	P002-1017	130°	10	4560264400207
	P002-1117	130°	11	4560264400214
	P002-1217	130°	12	4560264400221
	P002-1317	130°	13	4560264400238
	P002-1417	130°	14	4560264400245

ラグスクリュー

スレッド径φ10.8
スレッド長22.0mm 軸径φ10.8



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
ラグスクリュー	P007-0075	75	45602644003642
	P007-0080	80	45602644003659
	P007-0085	85	45602644003666
	P007-0090	90	45602644003673
	P007-0095	95	45602644003680
	P007-0100	100	45602644003697
	P007-0105	105	45602644003703
	P007-0110	110	45602644003710
	P007-0115	115	45602644003727


エクストラスクリュー

スレッド径φ5.0
スレッド長18.0mm 軸径φ5.0



製品名	カタログNo.	首下長(mm)	JANコード
エクストラスクリュー	P008-0050	50	45602644003895
	P008-0055	55	45602644003901
	P008-0060	60	45602644003918
	P008-0065	65	45602644003925
	P008-0070	70	45602644003932
	P008-0075	75	45602644003949
	P008-0080	80	45602644003956
	P008-0085	85	45602644003963
	P008-0090	90	45602644003970
	P008-0095	95	45602644003987

エンドキャップ

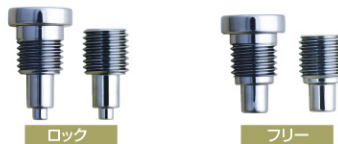

製品名	カタログNo.	延長(mm)	JANコード
エンドキャップ ロック	P010-0000	0	45602644004373
	P010-0005	5	45602644004403
	P010-0010	10	45602644004434
エンドキャップ フリー	P011-0000	0	45602644004502
	P011-0005	5	45602644004533
	P011-0010	10	45602644004564

ロングネイル

前捻角10° 近位径φ16.5 遠位径φ10.0



製品名	カタログNo.	前捻	角度	全長(mm)	JANコード
ネイル125° ロング左	P003-1023L	左	125°	230	4560264400399
	P003-1024L	左	125°	240	4560264400405
	P003-1026L	左	125°	260	4560264400429
	P003-1028L	左	125°	280	4560264400443
	P003-1030L	左	125°	300	4560264400467
	P003-1032L	左	125°	320	4560264400481
ネイル130° ロング左	P003-1034L	左	125°	340	4560264400504
	P003-1036L	左	125°	360	4560264400528
	P004-1023L	左	130°	230	4560264402072
	P004-1024L	左	130°	240	4560264402089
	P004-1026L	左	130°	260	4560264402106
	P004-1028L	左	130°	280	4560264402126
ネイル125° ロング右	P004-1030L	左	130°	300	4560264402140
	P004-1032L	左	130°	320	4560264402164
	P004-1034L	左	130°	340	4560264402188
	P004-1036L	左	130°	360	4560264402201
	P005-1023R	右	125°	230	4560264401235
	P005-1024R	右	125°	240	4560264401242
ネイル130° ロング右	P005-1026R	右	125°	260	4560264401266
	P005-1028R	右	125°	280	4560264401280
	P005-1030R	右	125°	300	4560264401303
	P005-1032R	右	125°	320	4560264401327
	P005-1034R	右	125°	340	4560264401341
	P005-1036R	右	125°	360	4560264401365
ネイル130° ロング右	P006-1023R	右	130°	230	4560264402911
	P006-1024R	右	130°	240	4560264402928
	P006-1026R	右	130°	260	4560264402942
	P006-1028R	右	130°	280	4560264402966
	P006-1030R	右	130°	300	4560264402980
	P006-1032R	右	130°	320	4560264403000
	P006-1034R	右	130°	340	4560264403024
	P006-1036R	右	130°	360	4560264403048

ディスタルスクリュー


スレッド径φ5.0




製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード	
ディスタルスクリュー	スタンダード用	P009-0026	26	45602644004038
		P009-0028	28	45602644004045
		P009-0030	30	45602644004052
		P009-0032	32	45602644004069
		P009-0034	34	45602644004076
		P009-0036	36	45602644004090
		P009-0038	38	45602644004106
		P009-0040	40	45602644004113
		P009-0042	42	45602644004120
		P009-0044	44	45602644004137
	ロング用	P009-0046	46	45602644004151
		P009-0048	48	45602644004168
		P009-0050	50	45602644004175
		P009-0052	52	45602644004182
		P009-0054	54	45602644004199
		P009-0056	56	45602644004212
		P009-0058	58	45602644004229
		P009-0060	60	45602644004236

販売名	IPTネイルシステム
医療機器承認番号	21600BZZ00127A01
医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと

滅菌済み 再使用禁止



販売元

 株式会社 ホムズ技研 営業部

東京支店	Tel: 03-5989-0090	Fax: 03-5989-0091
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006