

# Two Extra Screw

ネイルシステム

ロングネイル

230mm



HOMS 

株式会社 ホムズ技研

**ロングネイル手技 概要**

※基本的な一連の手技は Two Extra Screw ネイルシステムカタログをご参照ください。

≡ 整備



リダクションロッド (ST) Sを用いて骨折部を整復します。

≡ デバイス準備



ロングネイルに専用のターゲットデバイスを接続します。左右に合わせ、専用のディスタルガイド (左用又は右用) をつまみにて接続固定します。ディスタルスクリュー用スリーブを挿入し、ディスタルスクリュードリルを通しネイルに干渉しないことを確認します。

≡ 遠位ドリリング



遠位スクリューホールのドリリングを行います。

**ロングネイル Implant Line up**

※ラグスクリュー、エクストラピン/スクリュー、ディスタルスクリュー及びエンドキャップのラインアップは Two Extra Screw ネイルシステムカタログをご参照ください。

ロングネイル 230mm

- 近位径 φ16.5
- 前捻角 10°
- 遠位径 φ10 φ11 φ12

適応例 大腿骨転子下骨折, リビジョン




製品名	カタログNo.	前捻	頸体角	遠位径(mm)	JANコード
TESネイル125° ロング 左	P503-1023L	左	125°	10	4560434072289
	P503-1123L			11	4560434073309
	P503-1223L			12	4560434073316
TESネイル130° ロング 左	P504-1023L	左	130°	10	4560434072395
	P504-1123L			11	4560434073330
	P504-1223L			12	4560434073347
TESネイル125° ロング 右	P505-1023R	右	125°	10	4560434072500
	P505-1123R			11	4560434073361
	P505-1223R			12	4560434073378
TESネイル130° ロング 右	P506-1023R	右	130°	10	4560434072616
	P506-1123R			11	4560434073392
	P506-1223R			12	4560434073408

<インプラント>

販売名	TESネイルシステム
医療機器承認番号	22700BZX00086000
医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

<器械>

販売名	IPTネイルシステム用手術器械 TESネイルシステム用手術器械
医療機器届出番号	20B1X00006H00001 20B1X00006H00035
医療機器分類	一般医療機器
成分	ステンレス, PF, アルミ合金, PEEK
使用上の注意	添付文書参照のこと

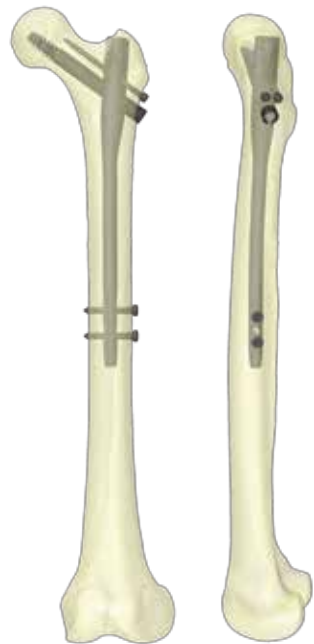

販売元

 株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

東京支店	Tel: 03-3230-1112	Fax: 03-3230-1113
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元  
株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006