

# HAI

## 顆部用圧迫スクリューユニット



顆部用シャフトスクリューとロックナットが  
ユニットで包装されています。

### 償還区分

- 固定用内副子(スクリュー)・  
その他のスクリュー・圧迫調整固定用(一般用)  
F1-c-2
- 固定用内副子用ワッシャー  
FK-2 ×2

## [適応例] 大腿骨遠位部 (顆部部分関節内) 骨折

### 顆部用シャフトスクリュー & ロックナットシステム

シャフトのロックリングと、ナットに内蔵されたリング部材との係合ラチェット機構により、ナットの緩みを防止し、**持続的圧迫**を可能とします。

### ワッシャー設置適合性


傾斜のきつい顆上部の解剖学形状を考慮し、首振り可能な大径(φ17mm)又は小径(φ14mm)ワッシャーを選択できます。

ワッシャーが骨面にフィットし、骨内への埋没を防ぎます。




## 手術手技概要

### 1. 顆部内側ドリリング

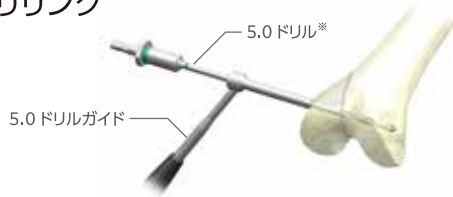


骨折部の修復後、5.0ドリル<sup>※</sup>にてドリリングを行います。

### 2. カウンターシンク

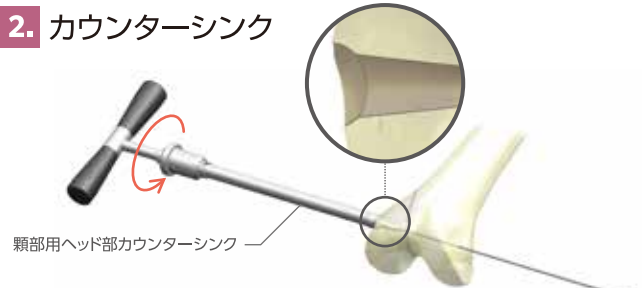

カウンターのシンクにて内・外側皮質を円錐状に開窓します。


### 3. スクリュー長計測

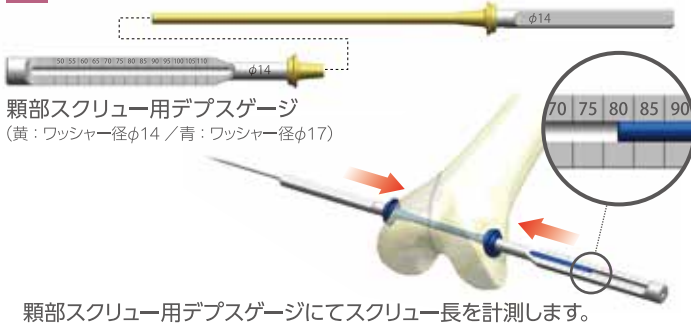

顆部スクリュー用デプスゲージ  
(黄: ワッシャー径φ14 / 青: ワッシャー径φ17)

顆部スクリュー用デプスゲージにてスクリュー長を計測します。

### 4. スクリュー挿入

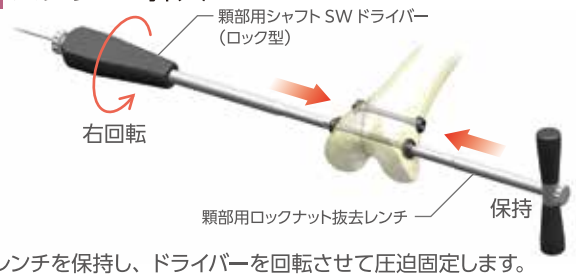

Tレンチを保持し、ドライバーを回転させて圧迫固定します。

## 顆部用圧迫スクリューユニット



カタログNo.	スクリュー全長 (mm)	ワッシャー径	JANコード	カタログNo.	スクリュー全長 (mm)	ワッシャー径	JANコード
H038-3050	50	φ17	4560434105284	H038-4050	50	φ14	4560434104638
H038-3055	55		4560434105321	H038-4055	55		4560434104676
H038-3060	60		4560434105369	H038-4060	60		4560434104713
H038-3065	65		4560434105406	H038-4065	65		4560434104751
H038-3070	70		4560434105444	H038-4070	70		4560434104799
H038-3075	75		4560434105482	H038-4075	75		4560434104836
H038-3080	80		4560434105529	H038-4080	80		4560434104874
H038-3085	85		4560434105567	H038-4085	85		4560434104911
H038-3090	90		4560434105604	H038-4090	90		4560434104959
H038-3095	95		4560434105642	H038-4095	95		4560434104997

### <インプラント>

販売名	HAI大腿骨逆行性髓内釘システム	滅菌済み 再使用禁止
医療機器承認番号	23000BZX00390000	
医療機器分類	高度管理医療機器	
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V	
使用上の注意	添付文書参照のこと	

### <器械>

販売名	HAI大腿骨逆行性髓内釘システム用手術器械
医療機器届出番号	20B1X00006H00043
医療機器分類	一般医療機器
成分	ステンレス, チタン合金, PF
使用上の注意	添付文書参照のこと

(※) 販売名: 骨手術用穿孔器具  
医療機器認証番号: 22200BZX00919000

### 販売元

HOMS 株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

東京支店	Tel: 03-3230-1112	Fax: 03-3230-1113
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

### 製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006